

 made
in
Germany



VARIOVISC[®]

Viskosupplement gegen Arthrose



Der Weg zur Schmerzlinderung durch VARIOVISC[®]

- schenkt Mobilität
- lindert Schmerz
- mäßigt Kniearthrose
- verzögert Knieoperationen


0297

VARIOVISC® ist ein neues speziell entwickeltes Visko-supplement. Es wirkt wie eine junge, gesunde Gelenk-flüssigkeit und lindert dadurch langanhaltende Schmerzen im Knie. Die Mobilität wird erhöht.

VARIOVISC® ist ein Hydrogel auf Hyaluronsäurebasis nicht-tierischen Ursprungs und wird durch bakterielle Biofermentation hergestellt.

made
In
Germany



CE
0297

Wie wirkt VARIOVISC®?

- als Gelenkschmiermittel
- direkt im Gelenk
- lindert Schmerzen

VARIOVISC® positioniert sich nach Injektion zwischen dem Gelenk und wirkt als Gelenkschmiermittel und Polster.



*nicht quervernetzte
Hyaluronsäure*



*VARIOVISC® –
hoch quervernetzte Hyaluronsäure*

Kniearthrose

Wenn Sie unter Kniearthrose leiden, kennen Sie sicherlich die Hauptsymptome wie Schmerzen und körperliche Immobilität, die im Alltag stören.

Wie entsteht Kniearthrose?

Die verringerte oder mit der Zeit verlorene Gelenkflüssigkeit und Degeneration des Gelenkknorpels führen zur Kniearthrose. Diese macht sich durch direkten, schmerzhaften Kontakt der Knochen und durch entzündliche Reaktionen (z.B. Schwellung, Juckreiz, Rötung) bemerkbar. Diese Symptome verschlimmern sich mit der Zeit.

Es gibt keine Heilung für Kniearthrose, aber es gibt Therapien um die Symptome zu verlangsamen und zu reduzieren, z.B. Gewichtsverlust, orale Medikamente, Kortikosteroid-Injektionen, Knieoperation und Viskosupplementation.



Was ist Viskosupplementation?

Viskosupplementation ist eine Methode wobei Hyaluronsäure (HA) direkt ins Kniegelenk injiziert wird.

Was ist VARIOVISC®?

VARIOVISC® ist ein neues Viskosupplement auf Hyaluronsäurebasis zur Behandlung von Kniearthrose. Nachdem es ins Kniegelenk injiziert wurde, positioniert sich das VARIOVISC®-Gel zwischen den Knochen und wirkt als Gelenkschmiermittel. VARIOVISC® polstert das Gelenk auf und ermöglicht eine Neubildung des Knorpels.

Wie lange hält die Wirkung an?

Die Vorteile dauern die folgenden 6 bis 12 Monate nach der Behandlung an.

Wie wird VARIOVISC® angewendet?

VARIOVISC® wird ins Kniegelenk injiziert. Die Behandlung kann für 2 bis 3 Mal wiederholt werden und muss unter sterilen Bedingungen von einem Arzt durchgeführt werden.

Gibt es Nebenwirkungen?

VARIOVISC® kann vorübergehende Schmerzen und Schwellungen im Injektionsbereich verursachen. Andere Nebenwirkungen wie Rötung, Juckreiz usw., können auftreten und 1-4 Tage dauern (in einigen Fällen bis zu 7 Tagen).

Für weitere Informationen fragen Sie Ihren Arzt.



VARIOVISC[®]

Viskosupplement gegen Arthrose

- **Wiedergewinnung der Mobilität**
- **Schmerzlinderung**
- **Verlangsamter Abbau des Knieknorpels**
- **Verzögert Knieoperationen**



Sicherheit


Die entsprechenden Tests zur sicherheitsrelevanten Körperverträglichkeit wurden nach neuesten internationalen Normen und Standards durchgeführt.

Klinische Daten

Die erste Studie mit 20 Patienten mit Kniearthrose zeigte 6 Monate lang eine deutliche Schmerzlinderung nach Behandlung mit VARIOVISC®.

Die zweite Studie mit 62 Patienten mit Kniearthrose zeigte 3 bis 6 Monate lang eine deutliche Schmerzlinderung nach Behandlung mit VARIOVISC®.

Das Diagramm zeigt den Schmerzurückgang bei Arthrose-Patienten 6 Monate nach Injektion mit VARIOVISC®. Das Schmerzniveau wird durch zwei international anerkannte Methoden gemessen, Visuelle Analogskala für Schmerz – VAS und Western Ontario und McMaster Universities Arthritis-Index – WOMAC.

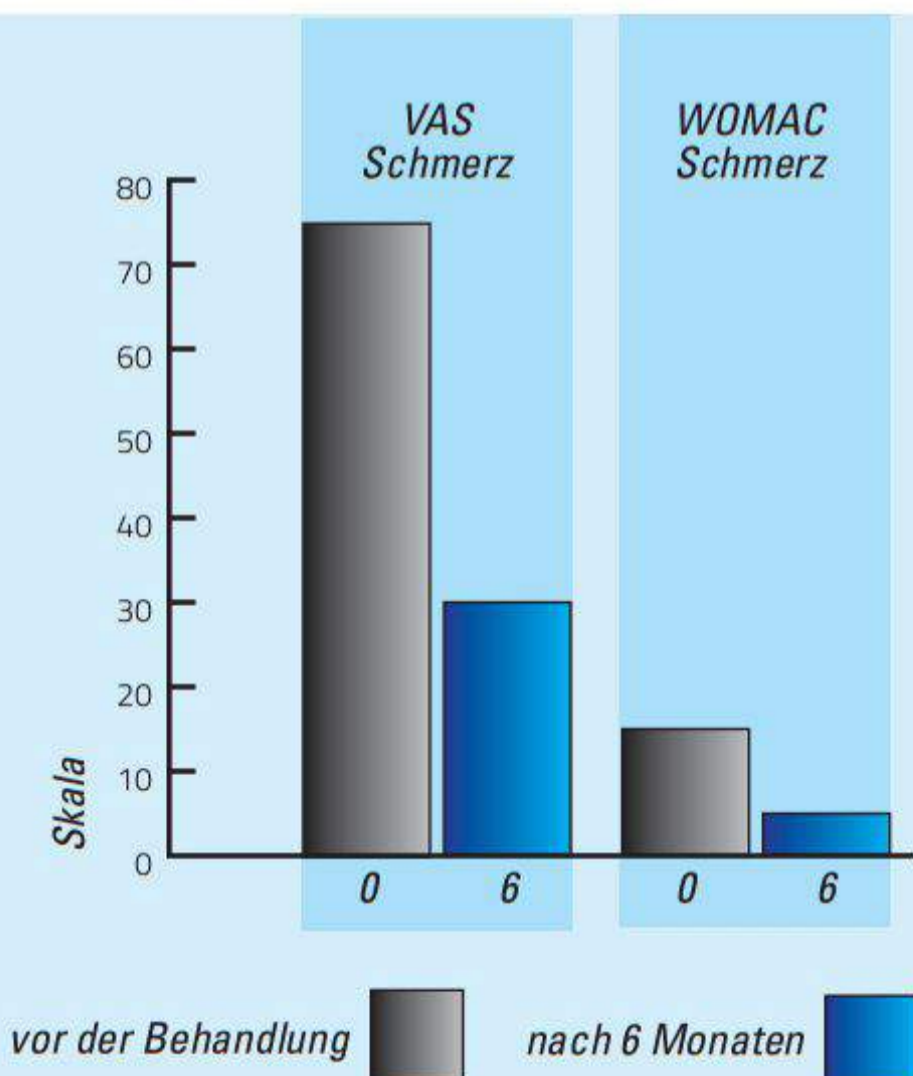



www.variovisc.com

VARIOVISC® wird nach höchsten Qualitätsstandards und neuester Technologie in Deutschland hergestellt.

N.B.: Dieses Produkt ist ausschließlich für die Anwendung im Kniegelenk durch Ärzte vorgesehen, die die intraartikuläre Injektionstechnik beherrschen. Die in dieser Broschüre enthaltene Information erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das Produkt VARIOVISC® wird Ihnen bekannt gemacht, alle relevanten Details zum praktischen Gebrauch können jedoch nicht erwähnt werden. Fragen Sie daher Ihren Arzt nach mehr Informationen über Zusammensetzung, Indikationen, Kontraindikationen, Unverträglichkeiten und Nebenwirkungen.

Vertrieb durch:



NOVAMEDICAL GmbH

Elisabeth-Selbert-Str. 5 • D-40764 Langenfeld • Germany

Fon +49 2173 39955 • Fax +49 2173 3995454

info@novamedical.de • www.novamedical.de

VARIOVISC® wird hergestellt von der
ADODERM GmbH • Haslacherweg 12b • D-51063 Köln • Germany

D.75.72/01